

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
روزانه	کابل و دو شاخه برق ورودی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	اتصال برق ورودی به دستگاه UPS یا استابلایزر استاندارد کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	دستگاه را از نظر صدا، دما و بوی نامناسب کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	دستگاه را از نظر نشتی مایع بررسی نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	مسیر آب ورودی و خروجی دستگاه را از نظر گرفتگی و نشتی کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد پمپ خون را پس از اتصال ست دیالیز کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	دستگاه Self Test را پاس می کند.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بدنه دستگاه را از نظر نظافت کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سطوح خارجی و صفحه نمایش دستگاه را از نظر نظافت (با مواد مورد تایید کمپانی سازنده) بررسی نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ظرف های اسید و بلیچ را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محل قرارگیری ظرف های اسید، بلیچ و محلول دیالیز خشک می باشد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	نحوه انجام شستشوی دستگاه را طبق دستورالعمل کمپانی سازنده کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>