

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
هفتگی	درب پمپ خون را از نظر شکستگی کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محدوده آلارم کانداکت را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محدوده آلارم فشار وریدی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محدوده آلارم فشار شریانی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محدوده آلارم دمای محلول دیالیز را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بدنه دستگاه از نظر شکستگی و ترک خوردگی کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	محل قرارگیری پودر بیکربنات را از نظر شکستگی و نشتی کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	پورت محلول اسیدی و کوپلر ها را از نظر عملکرد کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>