

چک لیست نگهداری پیشگیرانه (PM) دستگاه همودیالیز JMS

شماره سریال:

مدل دستگاه:

دوره	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
ماهانه (توسط شرکت تدا)	فلو آب ورودی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	فیلتر آب ورودی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	پمپ خون را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	پمپ سرنگ را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد سنسور تشخیص هوا را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد کلیه شیرهای برقی را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	کانداکت بیکربنات را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	کانداکت محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سنسور تشخیص نشستی خون را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد هواگیری محلول دیالیز را کنترل نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	عملکرد و کارایی باتری کنترل گردد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	دمای محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سنسور فشار وریدی را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سنسور فشار شریانی را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	سنسور فشار محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
پمپ اولترافیلتراسیون را کنترل و کالیبره نمایید.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	