

### JMS Single Patient Dialysis System SDS-50



۱




از کیفیت و فشار آب ورودی همواره اطمینان حاصل کنید.

۲



دستگاه را در برابر آب یا هر مایع دیگر محافظت نمایید.

۳

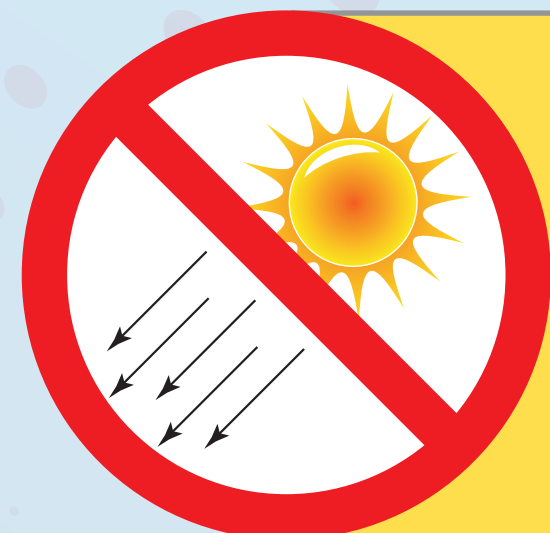

دستگاه را نزدیک وسایل گرمازا و فرکانس بالا قرار ندهید.

۴



از اتصال به زمین برق ورودی اطمینان حاصل کنید.

۵



برای جلوگیری از نوسانات برق، از استابیلایزر یا UPS استاندارد استفاده شود.

۶



روی صفحه نمایش فشار بیش از حد وارد نکنید.

۷




طبق دستورالعمل شرکت تدابیر شستشو و رسوبزدایی دستگاه صورت گیرد.

۸



قبل از خالی شدن مخازن محلول‌های شستشو، در خارج از محیط درمانی اقدام به پر نمودن مخازن نموده و از خشک بودن سطوح محل قرارگیری، اطمینان حاصل نمایید.

۹

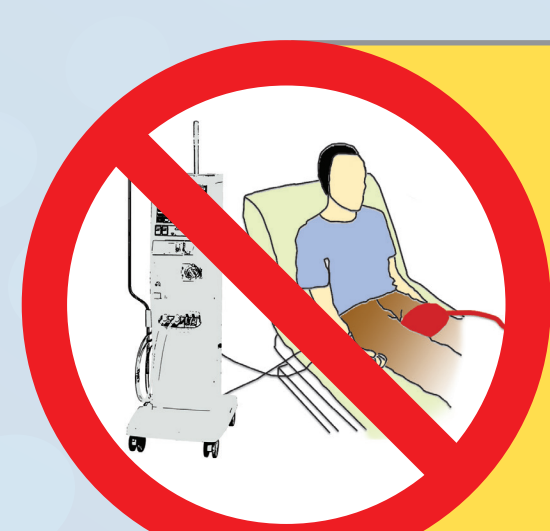

در هنگام ضد عفونی دستگاه‌ها بیمار نباید به دستگاه متصل باشد.

۱۰



در هنگام بروز هرگونه آلام، ابتدا دستگاه را در حالت Mute قرار داده و سپس با دقت متن آلام را بخوانید و نسبت به رفع مشکل به وجود آمده اقدام نمایید.

۱۱



برخی آلام‌ها توسط کاربر و با زدن گزینه Reset رفع می‌شوند، در غیر این صورت در اولین فرصت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

۱۲



هرگز اقدام به باز نمودن درب‌های دستگاه نکنید.

۱۳



بایستی دستگاه‌ها به صورت ماهانه توسط مهندسی این شرکت بازدید و کالیبره شود.

۱۴



در صورت بروز نوسانات شدید برق و هرگونه صدای غیرطبیعی از درون دستگاه از ادامه کار با دستگاه خودداری نموده و در اولین فرصت با کارشناسان شرکت تماس حاصل شود.

۱۵



از دستکاری دستگاه‌ها خودداری نمایید.

۱۶



در انتخاب نوع و کیفیت محلول‌های شستشو و لوازم مصرفی دیالیز دقت کافی به عمل آورید.



تدابیر (تدارکات درمان التیام)

تلفن واحد خدمات پس از فروش:

خط ویژه: ۷۷۵۳۰۳۶۰ (۰۲۱)

ارتباط مشتریان با مدیریت: ۰۹۳۵۴۰۰۳۴۷۴ - ۷۷۶۲۷۸۶۲