

دوره بازدید	شرح	کاملا سالم	مشکلات جزئی	خراب
روزانه	پریز برق، کابل و دو شاخه برق ورودی را کنترل نمایید.			
	دستگاه را از نظر صدا، دما و بوی نامطبوع کنترل نمایید.			
	دستگاه Self-Test را پاس می کند.			
	دستگاه را از نظر شکستگی های بدنه و عدم نشتی مایع بررسی نمایید.			
	دستگاه را از نظر اجرای آلارم ها (چراغ، پیغام خطا و صدای آلارم) کنترل نمایید.			
	دستگاه از نظر عملکرد ظاهری نمایشگرها/ نشانگرها کنترل شود.			
	بدنه دستگاه را از نظر نظافت (مطابق توصیه ی کمپانی سازنده) کنترل نمایید.			
هفتگی	محل استقرار دستگاه را ( مطابق توصیه کمپانی سازنده) کنترل نمایید.			
	پایه نگهدارنده ی پمپ را کنترل نمایید.			
	دستگاه از نظر آلارم اتمام تزریق کنترل شود.			
ماهانه / سه ماهه	تنظیمات صدای (Volume adjustment) آلارم را کنترل نمایید.			
	حرکت اسلایدر/ لغزنده و کلاچ پمپ سرنگ را کنترل نمایید.			
	دستگاه از نظر اعلام آلارم انسداد (OCCL) کنترل شود.			
	عملکرد قطعات نگهدارنده ی سرنگ را کنترل نموده و آلارم های اتصال سرنگ به دستگاه (شناسایی قطر و انتهای سرنگ) را چک نمایید.			
	نمایشگر دستگاه را کنترل نمایید.			
	عملکرد کلیدهای دستگاه را کنترل نمایید.			
	قطعات قابل شستشوی پمپ سرم (مطابق توصیه ی کمپانی سازنده) مانند Finger Cassette و Tube Clamp را با آب گرم تمیز نمایید.			
	کابل ارتباطی و بدنه ی قطره شمار پمپ سرم کنترل شود.			
	کلیه ی آلارم ها (سنسور هوا و سنسور درب پمپ و ..... ) پمپ سرم کنترل گردد.			
	عملکرد و کارایی باتری دستگاه کنترل گردد.			

خراب	مشکلات جزئی	کاملا سالم	شرح	دوره بازدید
			اتصال مقاومت زمین حفاظتی دستگاه کنترل گردد.	شش ماهه (توسط شرکت)
			مقاومت چاه ارت اندازه گیری گردد.	
			تست جریان ناشتی زمین انجام گردد.	
			تست فشار ماکزیمم و محدوده های انسداد (L/M/H) پمپ کنترل شود.	
			تست ناشتی جریان بدنه انجام گردد.	
			کلیه کابل ها و اتصالات کنترل گردد.	سالانه (توسط شرکت)
			Empty alarm و End alarm و Reminder alarm را کنترل نمایید.	
تعویض نشد	تعویض شد		شرح	دوره بازدید
			با توجه به ساعت کارکرد (مطابق توصیه ی کمپانی سازنده) قطعات یدکی مورد نیاز پمپ تعویض گردد.	سالانه (توسط شرکت)
انجام نشد	انجام شد		شرح	دوره بازدید
			دستگاه ها جهت انجام تنظیمات و کالیبره نمودن پارامترها به نمایندگی انحصاری کمپانی سازنده داده شود.	سالانه (توسط شرکت)
			کنترل کیفی دستگاه ها توسط شرکت های مجاز صورت پذیرد.	